

Hier finden Sie Hilfe



Bewusstlose Person:

keine Reaktion
auf Ansprache oder Berührung.
Sie setzen den Notruf 112 ab
und lassen den AED aus dem
Wandkasten nehmen.

**Beginnen Sie sofort mit der
Herzlungen-Wieder-Belebung:
30 Kompressionen 2 Beatmungen**
**HLW fortsetzen, bis der AED zur
Verfügung steht.**

**Sie starten das Gerät durch
Deckelabnahme und
kleben die Defi-Elektroden wie
abgebildet auf den entblößten
Oberkörper.**
**Das Gerät startet eine automatische,
sichere Diagnose**

Folgen Sie den Anweisungen.
**Bei festgestellter Notwendigkeit löst
dieser HeartSave AS nach Ansage
den Schock automatisch aus.**

Folgen Sie den Anweisungen.